


Компакт-нейро

**ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**


Установка

Для установки ПО необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Запустите файл Setup.exe (данный файл находится в поставляемом USB накопителе с программным обеспечением «Компакт-нейро»). Для этого следует кликнуть правой кнопкой мыши по данному файлу и выбрать в появившемся окне пункт «*Запуск от имени администратора*»:

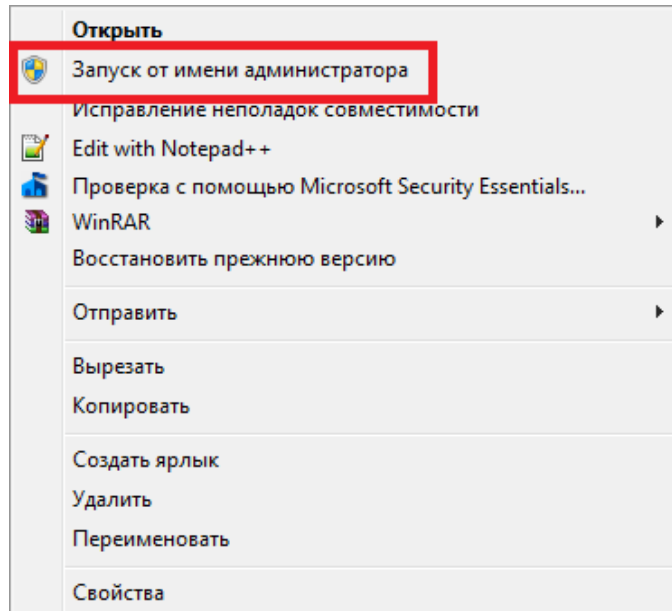


2. Выберите язык установки программы. Для этого из выпадающего списка выберите необходимый язык для установки и нажмите на кнопку «*ОК*». Для отмены установки программного обеспечения нажмите на кнопку

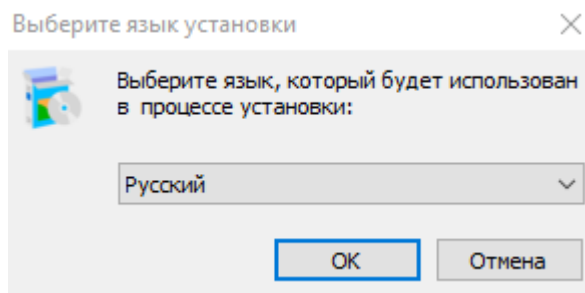


Из выпадающего списка выберите необходимый язык для установки и нажмите на кнопку «*ОК*». Для отмены установки программного обеспечения нажмите на кнопку «*Отмена*».

3. В появившемся окне нажмите на кнопку «*Установить*»:

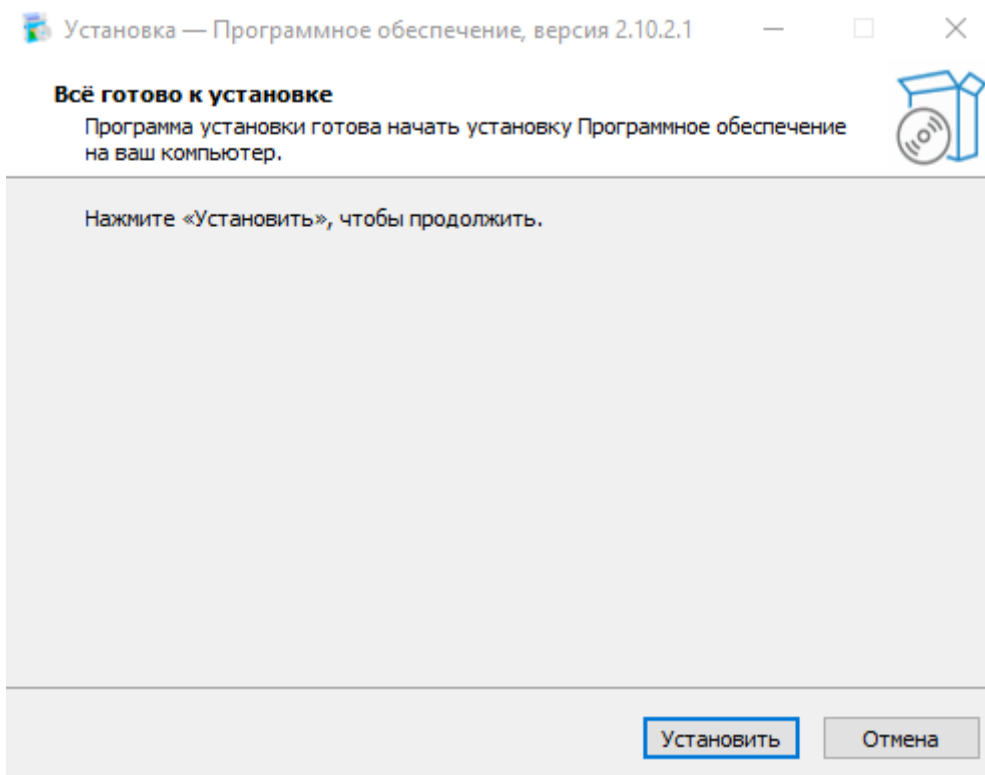


Для отмены установки программного обеспечения нажмите на кнопку **«Отмена»**.

В результате нажатия на кнопку **«Установить»** начинается процесс установки программы, в рамках которого будет происходить последовательная установка всех компонентов системы.

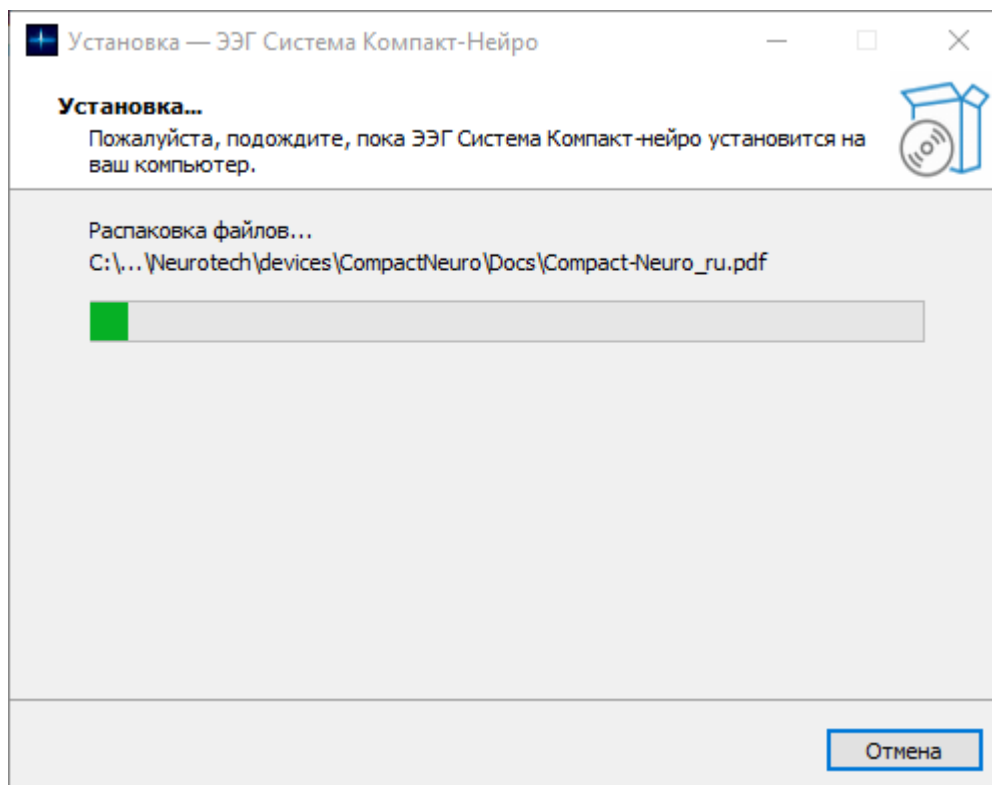



4. После установки компонентов системы откроется окно установки необходимых драйверов. Их необходимо установить. Для этого нажмите на кнопку **«Далее»**. Для отмены установки драйвера нажмите на кнопку **«Отмена»**.

5. После установки драйвера на экране пользователя появляется информационное окно с результатом установки. Для завершения процесса установки драйвера для устройства нажмите кнопку «*Готово*».

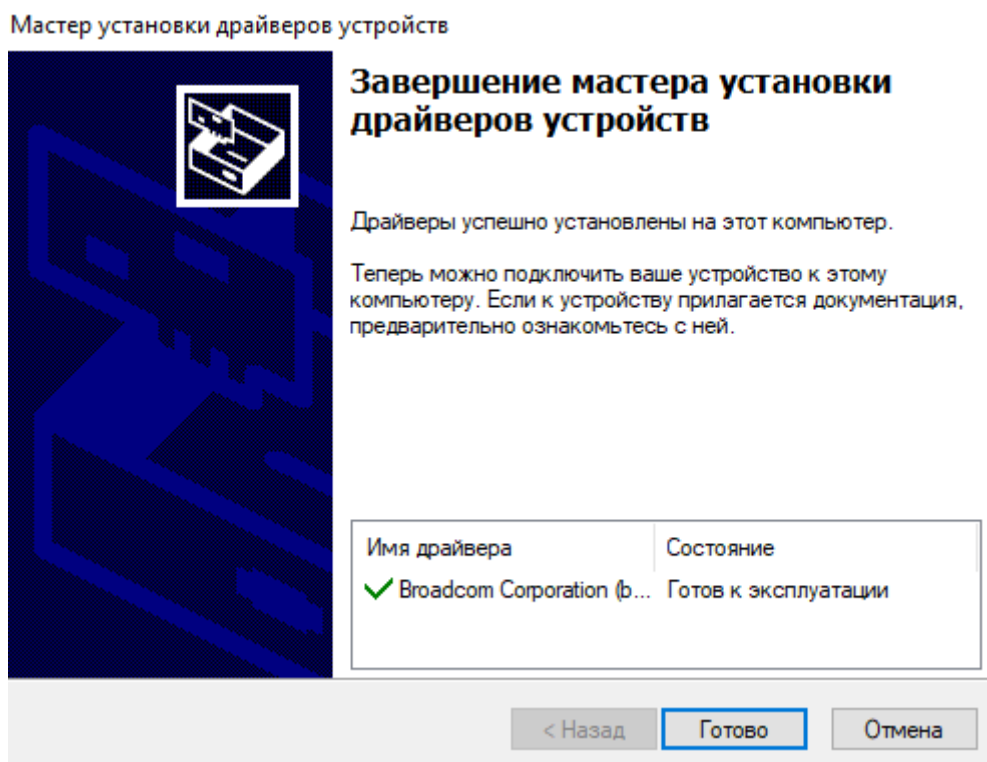

6. Следующим этапом будет установка компонента СУБД на ваш компьютер.

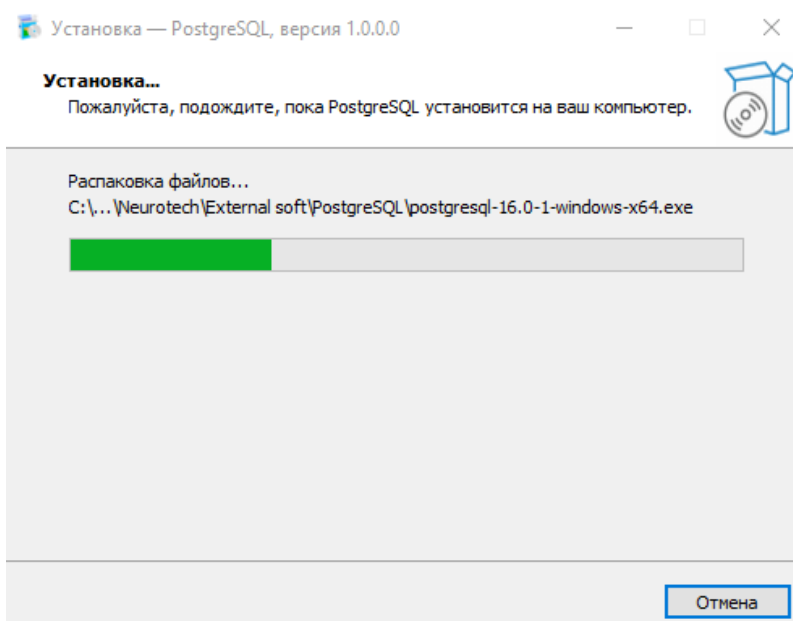


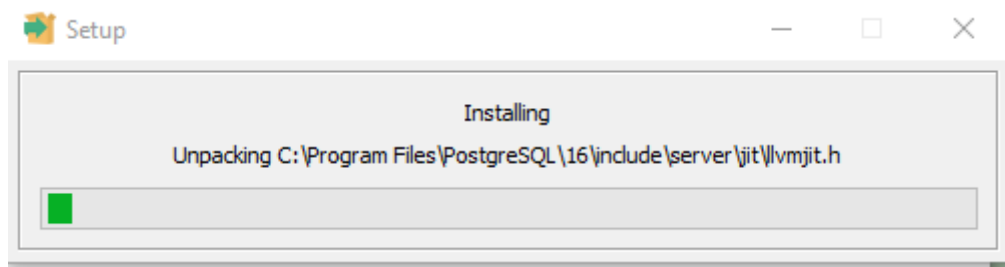

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь окончания установки.

7. Для завершения установки программного обеспечения может потребоваться перезагрузка компьютера.

По завершении процесса установки программы без перезагрузки компьютера появляется окно следующего вида:

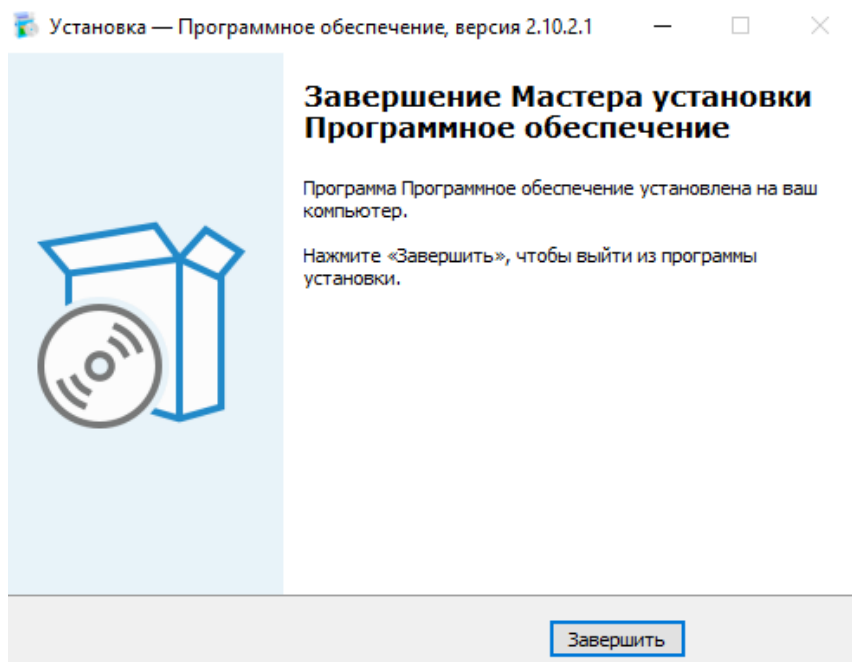

Для завершения процесса установки программы нажмите кнопку «**Завершить**». В результате установки программного обеспечения на рабочем столе появится ярлык для запуска программы:




Первичная настройка системы

После первого запуска программы, пользователю будет предложено выполнить первичную настройку системы. Для настройки необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Запустить программное обеспечение «Компакт-нейро», нажав на ярлык программы, расположенный на рабочем столе:



2. В появившемся окне Мастера настройки системы необходимо нажать кнопку «Далее». Для завершения работы мастера настройки системы необходимо нажать кнопку «Отмена».

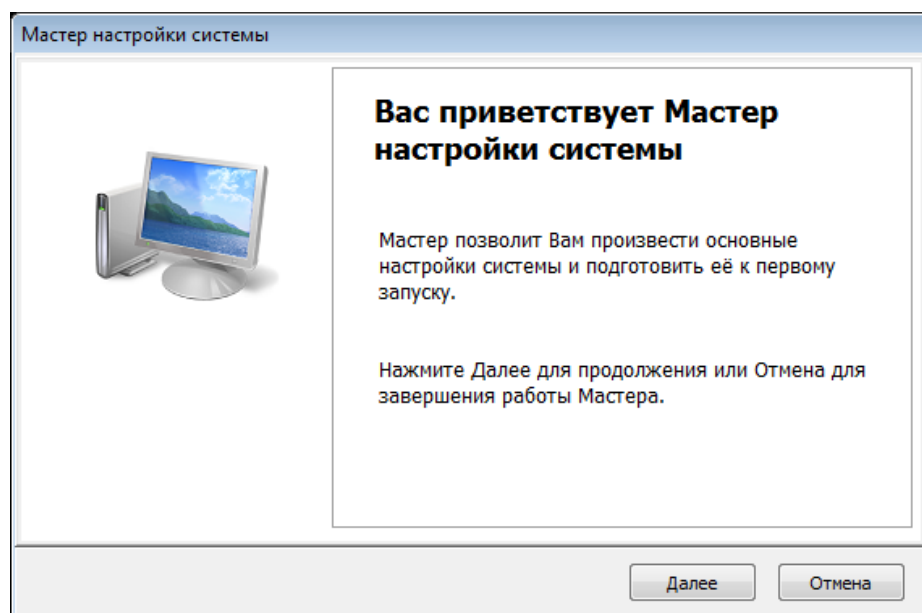

3. В появившемся окне необходимо ввести данные о пользователях системы:

Мастер настройки системы

Пользователи, работающие с системой

Заполните перечень пользователей которые будут работать с системой.

Нажмите Далее для продолжения или Отмена для завершения работы Мастера. Для возврата к предыдущему окну нажмите Назад.




№	Логин	Ф.И.О. пользователя	Администратор

Изменить перечень пользователей можно также из базы данных, выбрав пункт основного меню, подпункт "Инструменты" -> "Настройки".

Внимание! Под пользователем системы понимается сотрудник организации, ответственный за формирование итогового отчета по проведенному сеансу. При первом запуске программы пользователи системы в списке отсутствуют. Для корректной работы системы необходимо добавить (как минимум одного)

пользователя, нажав кнопку  «Добавить пользователя». Информация о пользователе системы отображается в отчетах по проведенным сеансам в разделе с указанием ФИО врача (поле «Врач»).

4. После нажатия на кнопку, предназначенную для добавления пользователя, появляется окно следующего вида:

Добавление нового пользователя



Выберите изображение

Ф.И.О. пользователя

Логин

Пароль

Введите пароль еще раз

☐ Отображать пароль

☒ Администратор

Для добавления нового пользователя необходимо ввести его фамилию, имя и отчество в соответствующее поле. Для добавления личной фотографии пользователя необходимо нажать на кнопку  «Выберите изображение» и указать путь к изображению в файловой системе компьютера. Также имеются предустановленные изображения. После внесения необходимой информации для продолжения работы с мастером настройки системы необходимо нажать на кнопку «Добавить». При первом

добавлении пользователя в качестве типа профиля (по умолчанию) используется роль

☒ Администратор

«Администратор».

После нажатия на кнопку «*Добавить*» новый пользователь добавляется в общий список пользователей системы.

После добавления пользователя нажмите кнопку «*Далее*».

5. На следующем шаге необходимо ввести наименование организации, в которой будет использоваться система. Для этого в соответствующем поле появившегося окна необходимо указать название учреждения, в котором осуществляется работа с системой.

Мастер настройки системы

Учреждение
В каком учреждении будет проводиться работа с системой?

Нажмите Далее для продолжения или Отмена для завершения работы Мастера. Для возврата к предыдущему окну нажмите Назад.

Название учреждения



Изменить название учреждения можно также из базы данных, выбрав пункт "Инструменты" -> "Настройки".

Назад Далее Отмена

6. После ввода его наименования следует нажать на кнопку «*Далее*».

7. В появившемся окне ввести место расположения ресурсов. Окно следующего шага настройки системы имеет следующий вид:

Мастер настройки системы

Расположение базы данных системы
В какой папке будут храниться данные о пациентах и обследованиях?

Нажмите Далее для продолжения или Отмена для завершения работы Мастера. Для возврата к предыдущему окну нажмите Назад. Для выбора папки нажмите Обзор.



C:\Users\Тест\AppData\Roaming\Neurotech\Database\Base\DBData\

Обзор

 Рекомендуется располагать БД системы на диске, имеющем наибольший объем свободного пространства и не являющемся системным (по умолчанию диск C).


Изменить место хранения файлов можно также из базы данных, выбрав пункт "Инструменты" -> "Настройки".

Назад Далее Отмена


При нажатии на кнопку **«Обзор»** открывается окно, в котором необходимо указать папку для хранения файлов базы данных.

8. После указания пути необходимо нажать на кнопку **«Далее»**.

9. Для сохранения всех настроек необходимо нажать на кнопку **«Сохранить»**

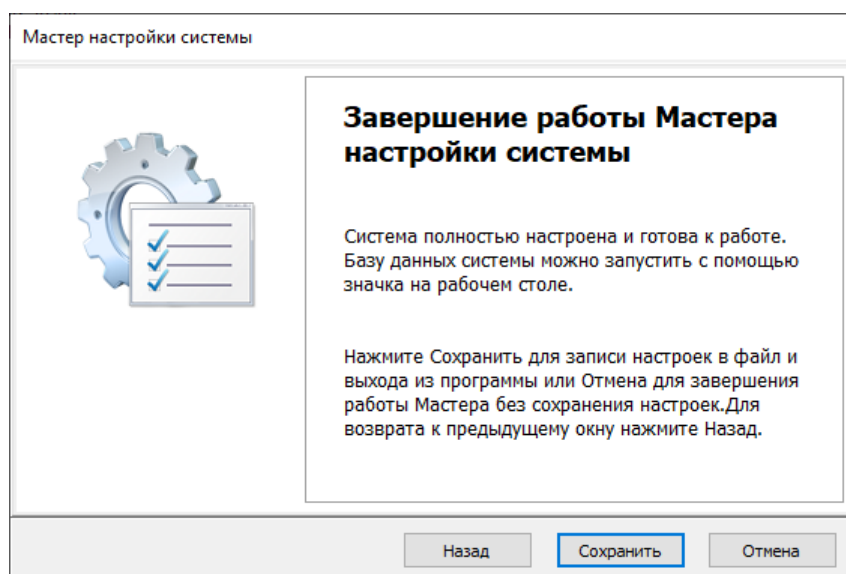

10. По завершении настройки появляется информационное окно с условиями использования данного программного продукта.

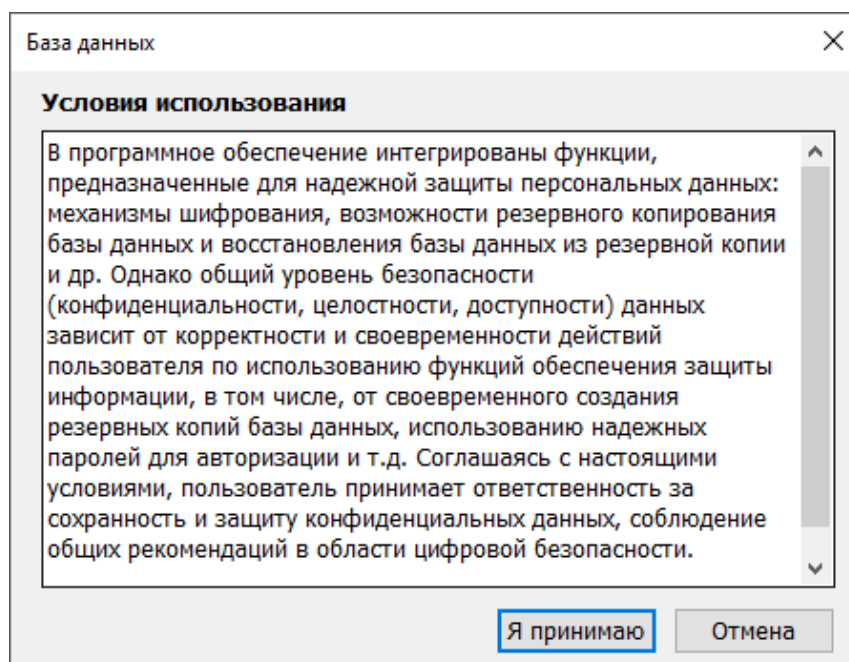

При нажатии на кнопку **«Я принимаю»** запускается окно авторизации, при успешном прохождении которой, открывается основное окно работы с программой. При нажатии на кнопку **«Отмена»** работа программы прекращается. При повторном запуске программы окно с условиями использования программного обеспечения открывается вновь. Повторная регистрация пользователей не требуется.